



ESwab® COPAN



urinska spužvica

Urisponge® COPAN



VACUETTE® CCM



Uzorkujte, umetnite, odломite

Čvrsto zatvori!

ESWAB KOMPATIBILNOST S RAZNIM MATERIJALIMA

Bris konjunktive	●
Bris: kože, rane	●
Bris: Nos / nazofarinks	●
Bris: usne šupljine, ždrijela	●
Bris: uretre, spolnih org., cerviksa i vagine	●
Bris: anusa ili rektuma	●
Intraoperativni bris	●
Ejakulat ili eksprimat prostate (V=1:1)	●
Biopsija / punktati (V=1:1)	●
Uzorak nežive okoline	●
Stolica (V=1:0,5)	●
Prvi mlaz urina (V=1:2)	●
Srednji mlaz urina	●

● Ne preporučuje se kod sumnje na *Vibrio cholerae*
Maksimalni odnos volumena (V)=1:2:
1 mL transportnog medija u odnosu na volumen materijala (maksimalno 2 mL urina u ovom primjeru)



Natopite spužvicu urinom i zatvorite!

Urisponge sistem

STABILIZATOR:	borna-kiselina impregnirana u spužvu
STABILIZACIJA:	aerobnih bakterija, gljiva, virusa i parazita
SOBNA TEMP.:	48 sati
HLADNJAK:	samo za PCR pretrage do 5 dana



Upotrijebite vakuum sistem kao na slici!

VACUETTE CCM sistem

STABILIZATOR:	manitol u kristalima
STABILIZACIJA:	aerobnih bakterija, gljiva, virusa i parazita
SOBNA TEMP.:	48 sati
HLADNJAK:	nije predviđeno za čuvanje u hladnjaku

ESwab COPAN sistema	
VRSTA MEDIJA / STABILIZATOR:	1 mL tekućeg Amies medij
STABILIZACIJA:	Aerobnih i anaerobnih bakterija, gljiva, virusa i parazita
SOBNA TEMPERATURA:	48 sati
HLADNJAK:	do 5 dana

VRSTE PRETRAGA & KOMPATIBILNOST:	
Mikroskopski preparat:	●
Kulture (bakterijska i mikološka):	●
Testiranje antigena:	●
PCR/PCR-multiplex pretrage:	●
Citološki preparat (LBC):	●

PRETRAGE:	URISP ONGE	VACUETTE	VRSTE UZORAKA:	URISP ONGE	VACUETTE
Mikroskopski preparat	●	●	Urin: srednji mlaz	●	●
Kulture (bakterijska i mikološka)	●	●	Urin: nefrostoma	●	●
Testiranje antigena	●	●	Urin: prvi mlaz (PCR: HPV, STI)	●	●
PCR/PCR-multiplex pretrage	●	●	Antigen test iz urina	●	●
Citološki preparat (LBC)	●	●	Urin kod sumnje na TB	●	●
Urinski sediment	●	●	Punkcijski urin	●	●

● Urin ne stariji od 4h